

Käyttöohje

USB -lämpömaski silmäluomille

Malli: VEM-200



Shanghai VisuScience Meditech Co., Ltd.

Address: No. 344 Sanlin Road, Pudong New Area, Shanghai, China

Tel: + +86 510 857 578 80

Email: info@visuscience.com

Website: www.visuscience.com

EC REP

SUNGO Europe B.V.

Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7, 2909VA

Capelle aan den IJssel, The Netherlands



Sisällysluettelo

1. Käyttötarkoitus	1
2. Silmämaskin rakenne	1
3. Silmämaskin käyttö	2
4. Silmämaskin sisäkangas	2
5. Silmämaskin huolto	2
7. Silmämaskin puhdistus	2
8. Ominaisuudet	3
9. Pakkauksen sisältö	3
10. Vian etsintä	3

⚠️ Varoitus

- 1) Käytä ainoastaan alkuperäistä valmistajan toimittamaa lämpötilansäätökaapelia.
- 2) Käytä ainoastaan CE- sertifioitua virtalähdettä tai virtapankkia.
- 3) Käytä silmämaskia varoen ja tarkista lämpötila huolellisesti ennen käyttöä.
- 4) Jos käyttäjällä on silmäsairaus, silmävamma tai korkea silmänsisäinen paine, keskustele tuotteet käytöstä lääkärin kanssa ennen sen käyttöä.
- 5) Jos käyttäjä tuntee olonsa epämukavaksi käytön jälkeen, lopeta sen käyttö ja ota yhteyttä lääkäriin.
- 6) Jos käyttäjä tuntee liian korkeaa lämpötilaa (kaikki ihotyypit kokevat lämpötilaerot eri tavalla), pienennä lämpötilaa, tai lopeta maskin käyttö, välttääksesi matalan lämpötilan palovammat.
- 7) Älä käytä maskia useammin kuin kahdesti päivässä.
- 8) Silmämaskin sisällä on virtapiiri. Älä pura sitä.
- 9) Katkaise virta, jos silmämaski on käyttämättömänä pitkään.
- 10) Säilytä silmämaski kuivassa ja viileässä ympäristössä kosteuden ja altistumisen aiheuttamien vaurioiden välttämiseksi.
- 11) Silmämaskia suositellaan käytettäväksi yli 18-vuotiaille.
- 12) Silmämaski ei ole lelu, joten pidä maski poissa vauvojen ja lasten ulottuvilta tukehtumisvaaran välttämiseksi.

1. Käyttötarkoitus

Silmämaskia käytetään lievittämään silmien väsymystä antamalla lämpöhoitoa silmäluomiin. Silmänaamiota voidaan lämmittää noin 750 kertaa.

2. Silmämaskin rakenne



3. Silmämaskin käyttö

- 1) Liitä silmämaski virtalähteeseen/virtapankkiin lähtöjännitteellä DC 5V/1A mukana toimitetulla lämpötilansäätökaapelilla.
- 2) Käynnistä laite painamalla lyhyesti virtapainiketta. Kun silmämaski on päällä, alkuperäinen lämpötila on korkeimmalla tasolla (44°C/111°F).
- 3) Paina virtapainiketta lyhyesti vaihtaaksesi lämpötilavaihtoehtoja 44°C/111°F, 41°C/106°F ja 39°C/102°F välillä. Lämpötilan ilmaisimen väri tarkoittaa seuraavia lämpötiloja on seuraava:
● Korkea(44°C) ● (41°C) ● Matala(39°C)

Silmämaski sammuu 12 minuutin käytön jälkeen automaattisesti. Voit myös halutessasi sammuttaa maskin virtapainikkeesta.

Laita silmänaamari ja säädä FlexStrip kuminauha mukavalle tasolle.

Paina joustavaa FlexStrip-kuminauhaa kunnolla, jotta se sopii paremmin kasvoille.



- ⚠ Silmämaski käynnistyy aina korkeimmalle lämpötila-asetukselle (44°C/111°F).
- ⚠ Älä suihkuta vettä silmänaamion päälle

4. Silmämaskin sisäkangas

Silmämaskin sisäkangas on vaihdettavissa ja se voidaan konepestä. Sisäkankaat suositeltu käyttöikä on 60 kertaa.

5. Silmämaskin huolto

6. Säilytä silmämaskia omassa pussissaan kosteuden ja likaantumisen välttämiseksi.
 - Ota yhteyttä jälleenmyyjään, jos silmämaskissa on toimintahäiriö. Älä pura silmämaskia itse.
 - Pidä silmänaamari paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto ja vältä voimakasta auringonpaistetta ja syövyttäviä kaasuja tai nesteitä.
 - Silmämaski soveltuu lento-, rautatie-, maantie- ja merikuljetuksiin. Vältä sen kastumista sateesta tai lumesta.
 - Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.

Varoitus: Älä aseta tuotetta suoraan auringonpaisteeseen tai ympäristöön, jossa on korkea kosteus. Jos et käytä sitä pitkään aikaan, puhdista se ja säilytä se vetoketjullisen pussin sisällä.

7. Silmämaskin puhdistus

- 1) Puhdista pinnalla oleva lika puhtaalla liinalla.
- 2) Jos lika on voimakasta, pyyhi se varovasti kostealla liinalla, joka liottaa neutraalia pesuainetta.
- 3) Älä anna veden tunkeutua silmänaamion sisään.
- 4) Pidä tuote kuivana.

8. Ominaisuudet


Malli	VEM-200
Lämmitystapa	USB connection
Lämmitys lämpötilat	44°C/111°F, 41°C/106°F, 39°C/102°F
Lämmityksen kesto	12 minuuttia
Sisäänmenojännite	DC 5V/1A
Tehonkulutus	4W (max.)
Väri	Space grey
Koko	22 x 7 cm
Paino	25g

9. Pakkauksen sisältö

Name	Quantity
Silmämaski sisäkankaalla	1pc
Lämpötilansäätökaapeli	1pc
Vetoketjupussi	1pc
Käyttöohje	1pc

10. Vian etsintä

Vika	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Maski ei tuota lämpöä	1). Tuote on kytketty pois päältä. 2). Tuote on ollut 12 minuuttia päällä ja katkaissut virran automaattisesti.	1). Paina virtapainiketta kevyesti käynnistääksesi maskin. 2). Paina virtapainiketta kevyesti käynnistääksesi maskin.
Lämpötilaindikaattori ei toimi.	1). Lämpötilansäätökaapeli on Rikki. 2). Lämpötilan säätökaapeli on huonosti kytketty.	1). Lämpötilansäätökaapeli pitää vaihtaa uuteen. 2). Kytke kaapeli uudelleen.

 Jos kokeilet yllä olevaa ratkaisua eikä silmämaski vielä toimi, ota yhteyttä jälleenmyyjään tai valmistajaan saadaksesi apua. Älä pura silmämaskia itse.



Shanghai VisuScience Meditech Co., Ltd.

Address: No. 344 Sanlin Road, Pudong New Area, Shanghai, China

Tel: + +86 510 857 578 80

Email: info@visuscience.com

Website: www.visuscience.com



SUNGO Europe B.V.

Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7, 2909VA

Capelle aan den IJssel, The Netherlands

